



## Gebrauchsanweisung

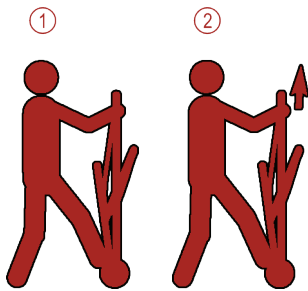

1. Stellen Sie den Ph-RESCUE-CHAIR® so vor sich auf, dass Sie den Ständer mit den Rädern sehen können. Stellen Sie den Fuß auf den unteren Bügel.



2. Ziehen Sie den Griffbügel nach oben, bis Sie hören, dass die Klemmbügel einrasten. Der ausschiebbare Griffbügel ist jetzt verriegelt. Lösen Sie die Sicherheitsgurte und ziehen Sie einen der Halter des Gleitriemens auf sich zu. Dadurch wird der Sitz aufgeklappt.

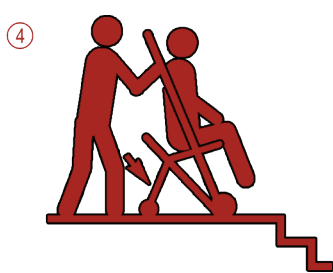

3. Die Person, die evakuiert werden soll, kann sich in den Stuhl setzen. Ziehen Sie ihn dann bis zum Balancepunkt auf sich zu und nehmen erst dann den Fuß vom unteren Bügel. Stellen Sie den Fuß auf das untere Rohr des Kickständers und ziehen ihn nach hinten zurück. Die Gasfeder unterstützt diesen Vorgang. Der Rettungsstuhl ist jetzt vollständig aufgeklappt und für den horizontalen Transport fahrbereit.



4. Befestigen Sie den Sicherheitsgurt. Fahren Sie zügig direkt zum Treppenhaus (Fluchtweg) oder zu einer Nottreppe. Kurz vor der ersten Stufe stellen Sie den Rettungsstuhl wieder in den Balancepunkt und drücken mit dem Fuß den Kickständer nach innen.



5. Setzen Sie den Ph-RESCUE-CHAIR® auf die Treppe. Wenn die Gleitriemen die erste Stufe berühren, tritt die Bremswirkung ein. Sobald die zweite Stufe erreicht ist, nehmen Sie die Hände an den Griffbügel und gleiten unter dem gleichen Winkel die Treppe weiter abwärts.



6. Sobald ein Treppenabsatz erreicht ist, sollten Sie sofort anhalten, Ihre Hände wieder zu den Seiten des Griffbügels legen, den Rettungsstuhl in Balance bringen und dann auf den großen Rädern abstützend zur nächsten Treppe fahren.

7. Sobald Sie unten angekommen sind, bringen Sie den Ph-RESCUE-CHAIR® wieder in Balance und fahren eine kurze Strecke auf den großen Rädern weiter. Klappen Sie dann den Kickständer mit der Gasfeder aus und fahren Sie die evakuierte Person zur Sammelstelle.